



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Esterilización de gasas

Código: PA-GU-7-PT-13

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 1 de 3

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
2. RESPONSABLE(S):	Auxiliares de Odontología
3. OBJETIVO:	Impedir la propagación de microorganismos nocivos para la salud individual, familiar y del paciente
4. ALCANCE:	Lograr con la ayuda térmica la adecuada esterilización de apósitos y gasas
5. MARCO NORMATIVO:	Resolución 02183 de 09/07/04: "Manual de Buenas Prácticas de Esterilización"

6. CONTENIDO:

No.	Actividad / Descripción	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Materiales <ul style="list-style-type: none">• Gasas,• Autoclave• Papel krepado•	Auxiliares de Odontología y enfermería	Registro de esterilización diaria
2	Elaboración Cortar con tijera cuadros de 8x8 cm. de gasa y doblar los bordes hacia adentro para evitar que queden hilos sueltos que puedan contaminar una herida.	Auxiliares de Odontología y enfermería	Registro de esterilización diaria
3	Empacado Empacar en bolsas de papel krepado,	Auxiliares de Odontología y enfermería	Registro de esterilización diaria
4	Etiquetado	Auxiliares de	Registro de



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Esterilización de gasas

Código: PA-GU-7-PT-13

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 2 de 3

	Etiquetar previamente a la esterilización con: nombre del elemento, fecha de esterilización y colocación de cinta indicadora.	Odontología y enfermería	esterilización diaria
5	Esterilización Ingresar las gasas al autoclave por 25 minutos a una temperatura de 134°C. Los paquetes son colocados uno al lado del otro.	Auxiliares de Odontología y enfermería	Registro de esterilización diaria
7	Almacenamiento Retirar del autoclave y guardar en lugar seco, libre de contaminantes	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
8	Diligenciamiento registros Las auxiliares de odontología diligencian el registro de esterilización diaria	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria

7. FORMATOS:

Registro de esterilización diaria

8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:

Gasas: es una malla, con más o menos hilos (lo cual determina la calidad del resultado final del impreso). Existen mallas para este proceso de muchos tipos y diferentes hilos usados. La gasa de algodón ha sido tradicionalmente usada en compresas y vendas para cubrir y proteger heridas sin impedir el contacto con el aire.

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA	VERSIÓN : No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-13	Elaboración protocolo: Esterilización de Gasas

10. ANEXOS:

N. / A.



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Esterilización de gases

Código: PA-GU-7-PT-13

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 3 de 3

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.

COPIA NO CONTROLADA