



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Esterilización de fresas

Código: PA-GU-7-PT-25

Versión: 0

Fecha de actualización: 04-04-2015

Página 1 de 3

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Auxiliares de Odontología
<b>3. OBJETIVO:</b>	Impedir la propagación de microorganismos nocivos para la salud individual, familiar y del paciente
<b>4. ALCANCE:</b>	Lograr con la ayuda de agentes químicos y térmicos la desinfección y posterior esterilización de las fresas
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	<b>Resolución 02183 de 09/07/04:</b> "Manual de Buenas Prácticas de Esterilización"

**6. CONTENIDO:**

No.	Actividad / Descripción	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Recoger las fresas contaminadas de la bandeja con guantes	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
2	Depositar en el limpiador ultrasónico mínimo por 10 minutos, disolviendo 5 cm <sup>3</sup> de detergente enzimático a 1 litro de agua. Si no se tiene detergente enzimático, se usa hipoclorito de sodio en concentración de 1000ppm, en un litro de agua por 5 minutos.	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
3	Retirar las fresas, lavar con agua limpia	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
4	Secar las fresas, con toallas de papel	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
5	Guardar en bolsas de esterilizar, para poder ver	Auxiliares de	Registro de esterilización diaria



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Esterilización de fresas

Código: PA-GU-7-PT-25

Versión: 0

Fecha de actualización: 04-04-2015

Página 2 de 3

	su contenido.	Odontología	
6	Además del número se etiquetará con: nombre del elemento, fecha de esterilización y colocación de cinta indicadora.	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
7	Ingresar las fresas al autoclave por 25 minutos a una temperatura de 134°C. Las fresas solo se usan por dos meses, tras lo cual se desecharán en guardián	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
8	Retirar del autoclave y guardar en lugar seco, libre de contaminantes	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria
9	Las auxiliares de odontología diligencian el registro de esterilización diaria	Auxiliares de Odontología	Registro de esterilización diaria

<b>7. FORMATOS:</b>	Registro diario de esterilización
<b>8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:</b>	<b>Fresas dentales:</b> son instrumentos que se utilizan en Odontología, para cortar, pulir la superficie dental y eliminar el tejido cariado presente.

**9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:**

FECHA	VERSIÓN : No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-25	Elaboración documento

**10. ANEXOS:** N. / A.



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Esterilización de fresas

Código: PA-GU-7-PT-25

Versión: 0

Fecha de actualización: 04-04-2015

Página 3 de 3

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

**Nota:** La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.

COPIA NO CONTROLADA